

BC plus™

VERICOM

Dental materials

Adesivo

Monocomponente

Fotopolimerizzante

BC plus a new age of technology



BC plus™

è un adesivo monocomponente di 5ª generazione fotopolimerizzante, progettato per adesioni in tutte le classi di restaurazioni composite dirette, su dentina e smalto, così come per procedure che implicano metalli, porcellana ed amalgama.

BC plus™

è una resina adesiva a base di etanolo e foto attivante

BC plus™

permette procedure di restaurazione indirette, grazie allo sviluppo di spessori minimi ed uniformi.



CE
0120

REGISTERED COMPANY
EN
46001
SGS

REGISTERED COMPANY
ISO
9001
SGS

Indicazioni per l'uso



Mordenzante la dentina con gel mordenzante per 15 secondi. Risciacquare il gel completamente e rimuovere l'eccesso di acqua con un leggero soffio d'aria, lasciando umida la superficie.



Saturare completamente la punta del Brush ed applicare 2 passaggi di adesivo. Dopo il secondo passaggio, attendere per 10 sec. Soffiare leggermente dell'aria per far volatilizzare il solvente. Fotopolimerizzare per 20 sec. con una lampada standard.



Disporre il composito all'interno della cavità e rifinire secondo le normali procedure dei materiali da conservativa.

Principali Applicazioni del BC Plus™

- Adesivo per restauri diretti
- Adesivo per ricostruzioni in composito ed amalgama
- Adesivo per restauri indiretti, porcellana, composito inlay, onlay (faccette e corone)
- Desensibilizzante dentinale.




Principali Componenti del BC Plus™

- Bis-GMA
- Dimetracrilato
- Acido Metacrilico
- Etanolo
- Additivi

Proprietà

- Resistenza di coesione alla dentina
- Scansione al SEM del BC Plus applicato sulla superficie del dente

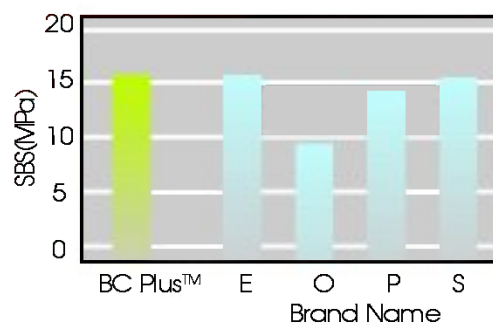

Confezione

- Adesivo BC Bond Plus flacone da 5ml.



Microfratture

	Micro-leakage score	Standard Deviation
BC Plus™	1.1	0.9
S	1.0	0.8
P	1.6	1.3
O	1.0	1.2

Tutti i dati sono misurati secondo il metodo e i test Vericom (ISO TR405)

Denfil™ Primer & Adhesive adesivo bicomponente



Denfil™ Primer & Adhesive è un adesivo di 4ª generazione fotopolimerizzante base bisGma per adesioni in tutte le classi di restaurazione ed efficace su un'ampia gamma di materiali. Grazie al doppio componente Primer e Adesivo si raggiungono elevate forze di adesione.

Confezione

- Primer, flacone da 5 ml
- Adesive, flacone da 5 ml



www.dental-world.it
e-mail: info@dental-world.it

Rivenditore di zona